


Opalescence®
trèswhite®
••••• SUPREME

2012¹
REALITY
Four Star Award
★★★★



Opalescence® Trèswhite® Supreme 10%, 15%

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПОЛНЕННЫЕ КАППЫ ДЛЯ ОТБЕЛИВАНИЯ - ПЕРЕКИСЬ ВОДОРОДА

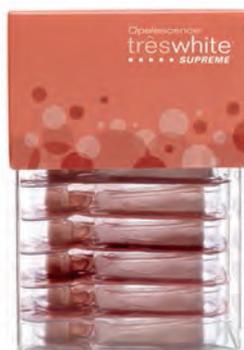

- Отбеливание с помощью готовых капп
- Профессиональный результат по доступной цене
- Никаких оттисков, моделей и работы лаборатории
- Гладкие и удобные; подходит к любой улыбке
- Незаметный прозрачный материал каппы
- 10% - носите всего 30-60 минут
- 15% - носите всего 15-20 минут
- Формула PF укрепляет эмаль, уменьшает чувствительность, предотвращает кариес^{2,3,4,5,6}

Области применения

"Bleaching to go" – в любое время и в любом месте. Готовые к применению предварительно наполненные каппы, содержащие гель на основе 10% или 15% перекиси водорода, - это идеальный способ профессионального отбеливания зубов. Этот метод наиболее экономичный, так как не требует оттисков, моделей и оплаты работ лаборатории. Особо рекомендуется для освежения цвета зубов после их профессиональной очистки, а также для закрепления и продления эффекта кабинетного отбеливания.

До и после



До.



После применения десяти капп с Opalescence Trèswhite Supreme.



До.



После применения десяти капп с Opalescence Trèswhite Supreme.



Courtesy of Dr. Lara Miller

До.



После применения шести капп с Opalescence Trèswhite Supreme.



Courtesy of Dr. Bruno Pelissier

До.



После применения десяти капп с Opalescence Trèswhite Supreme.

Инструкции



1. Выньте из упаковки.



2. Выровняйте каппу по центру зубного ряда.



3. Медленно втяните воздух или сглотните.



4. Снимите внешнюю каппу.



5. Снова втяните воздух или сглотните. При необходимости слегка надавите на каппу пальцем.



6. Носите каппу 60-90 минут.

Patient Kit

10 блистерных упаковок по 1 капле
для верхнего и нижнего зубного ряда

5703 Мята 10%



Хранить в холоде.

SixPack (6 штук)

6 наборов Patient Kit
(содержимое, как указано выше)

5706 Мята 10%

5707 Дыня 10%

5812 Мята 15%



Хранить в холоде.

Mini Kit 12Pack (12 штук)

12 наборов Mini Kit

5745 Мята 10%

5748 Мята 15%



Хранить в холоде.

Гель Opalescence PF с 10% или 15% перекисью водорода
для выдающихся результатов



Мягкий, тонкий, гибкий материал для более
облегающей и комфортной посадки

Стабилизирующая каппа только для введения и
размещения

1 www.reallyesthetics.com 2 Basting RT, et al: The Effects of Seven Carbamide Peroxide Bleaching Agents on Enamel Microhardness Over Time, J Am Dent Assoc. 2003 Oct; 134(10):1335-42. 3 Al-Qunaian TA, The Effect of Whitening Agents on Caries Susceptibility of Human Enamel, Oper Dent. 2005 Mar-Apr;30(2):265-70. 4 Clark LM et al: Influence of Fluoridated Carbamide Peroxide Bleaching Gel on Enamel Demineralization. (AADR Abstract #0497), 2006. 5 Amaechi BT et al: Enamel Fluoride Uptake from Fluoridated Carbamide Peroxide Bleaching Gel (AADR Abstract #0498), 2006. 6 Browning WD et al: Report on Low Sensitivity Whiteners, (AADR Abstract #1650), 2006.



Листы Sof-Tray® Classic



Области применения

Используйте листы Sof-Tray толщиной 0,9 мм для большинства отбеливающих кап, листы Sof-Tray толщиной 1,5 мм для пациентов с бруксизмом, а листы Sof-Tray толщиной 2,0 мм – для пациентов с тяжелой формой бруксизма или дисфункцией ВНЧС (височно-нижнечелюстного сустава).

226	Листы Sof-Tray Regular <i>25 листов (0,9 мм – 127 x 127 мм)</i>	ТОЛЩИНА 0,9 мм
227	Листы Sof-Tray Medium <i>20 листов (1,5 мм – 127 x 127 мм)</i>	ТОЛЩИНА 1,5 мм
284	Листы Sof-Tray Heavy <i>20 листов (2,0 мм – 127 x 127 мм)</i>	ТОЛЩИНА 2,0 мм

Для изготовления индивидуальных отбеливающих кап доктор Дэн Фишер рекомендует использовать пластиковые отбеливающие пластины, которые ложатся на зубы “как контактные линзы”. Рекомендуется использовать самые тонкие листы (0,9 мм). Более толстые листы предназначены для применения при бруксизме или дисфункции ВНЧС (височно-нижнечелюстного сустава). Листы, изначально разработанные для рынка США, имеют квадратную форму. При использовании круглых аппаратов для вакуумной формовки следует обрезать листы, придавая им форму окружности. Для этого используйте обычные ножницы и лекало окружности.

Ножницы для обрезки Ultradent® Ultra-Trim



- Используются для точного обрезания краев вокруг межзубных десневых сосочков
- Пружинный механизм не утомляет мышцы пальцев
- Легко захватывают материал каппы
- Изготовлены из прочной нержавеющей стали

605 Ножницы для обрезки Ultradent Ultra-Trim

Футляры для хранения кап Opalescence®



- Защищают каппы в промежутках между процедурами
- Плоские, легко помещаются в кармане
- Внутренние размеры: 7,5 x 7 x 1,5 см

707 Футляры для хранения кап (в ассортименте)
20 футляров для хранения кап