



КОНТЕЙНЕРЫ ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ

ОДИНАРНЫЙ КОНТЕЙНЕР
из беззольной пластмассы нормо

КОЛЬЦО -
ПОЗИЦИОНЕР



ОДИНАРНЫЙ КОНТЕЙНЕР
из беззольной пластмассы микро

КОЛЬЦО -
ПОЗИЦИОНЕР



КОНТЕЙНЕРЫ СТАЛЬ - ТИТАН

Контейнеры фабричного изготовления используются для помещения в них ретенционных колпачков. Их новая конструкция позволяет меньшие размеры по сравнению с предыдущими, обеспечивая такую же функциональность, но с улучшенной эстетикой.

ФОРМЫ ДЛЯ ПЛАСТМАССЫ И ДЛЯ ПАЙКИ




ЛАБОРАТОРИЯ

В случаях недостаточного вертикального пространства для избежания риска поломки пластмассового зуба необходимо применять защитные «крышки» или укрепляющие штифты.

РЕШЕНИЯ А



Защитная площадка, смоделированная из калиброванного воска толщиной 0,50 мм.

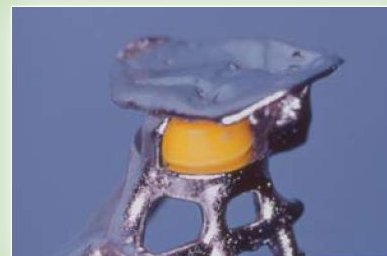

Защитная площадка в отливке с вставленным ретенционным колпачком.

РЕШЕНИЯ Б



Небольшие штифты из воска для увеличения ретенции пластмассы.



Контейнер с усилительными штифтами в отливке и вставленным колпачком.

КОНТЕЙНЕРЫ ФАБРИЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЗ СТАЛИ INOX ИЛИ ТИТАНА К РЕТЕНЦИОННЫМ КОЛПАЧКАМ

Приклеенные или припаянные к каркасу:
для точной установки использовать
КОЛЬЦА - ПОЗИЦИОНЕРЫ НОРМО И МИКРО

