

FISSURE SEALANT

Композитный материал для восстановления зубов




ARKONA

FISSURE-SEALANT является прозрачным, наногибридным композитом для герметизации фиссур, отверждаемым видимым светом.

Инструкция применения

1.

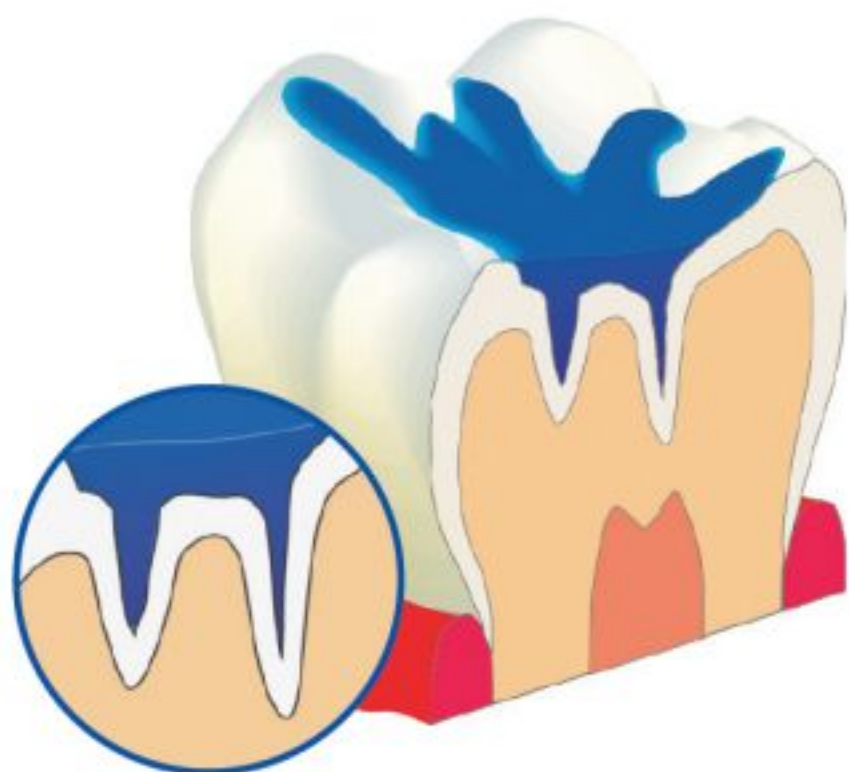

- Нанести протравочный гель на поверхность, предназначенную для герметизации, обращая особенное внимание на то, чтобы композит обязательно попал на дно фиссуры, оставить на 20-30 сек.
- Смыть протравочный гель сильной струей воды и тщательно осушить.

Если поверхность протравленной эмали не приобрела матово-белый цвет, процесс протравки следует повторить. Если на протравленную поверхность случайно попадет влага или слюна, следует протравить в течение 10 с.

2. Герметизация

- Тщательно распределить FISSURE-SEALANT на протравленной поверхности зуба.
- Полимеризовать согласно таблице полимеризации.



А. Протравленный зуб



В. Зуб частично покрытый герметиком



С. Загерметизированный зуб

